

Instruktion för korrekt mättagning för Juzo® fot- och tådelen

Notera:

- Foten ska vara maximalt fri från svullnad.
- Mät noga och ange måtten så **exakt som möjligt**.

Om fot-tådelen ska användas i kombination med benstrumpa, ska överlappning göras med minst 3 cm. Därför måste det anges på beställningen för punkten "A", att den är minst 3 cm från mätpunkten "A1".

Omfångsmått

Mät alltid omfångsmåtten i rät vinkel från foten.

"cA" = omfångsmått vid lilltåns grundled

"cA1" = för vuxna minst 6 cm proximalt från "cA"

"cX": Mät vid tåns grundled.

För enklare mätning, använd med fördel Juzo® fintermåttband.

Med öppna tår: vänligen ange "cZ" där materialet ska sluta.

För slutna tår: vänligen ange "cZ" till nagelroten.


Längdmått:

"∅AA1" = minst 6 cm för vuxna, för barn ange, lämpligaste möjliga.

Längd från "cX":

Med öppna tår: vänligen ange var materialet ska sluta (min 1,5 cm rekommenderas)

Med slutna tår: vänligen ange måttet från "cX" till änden av tån.

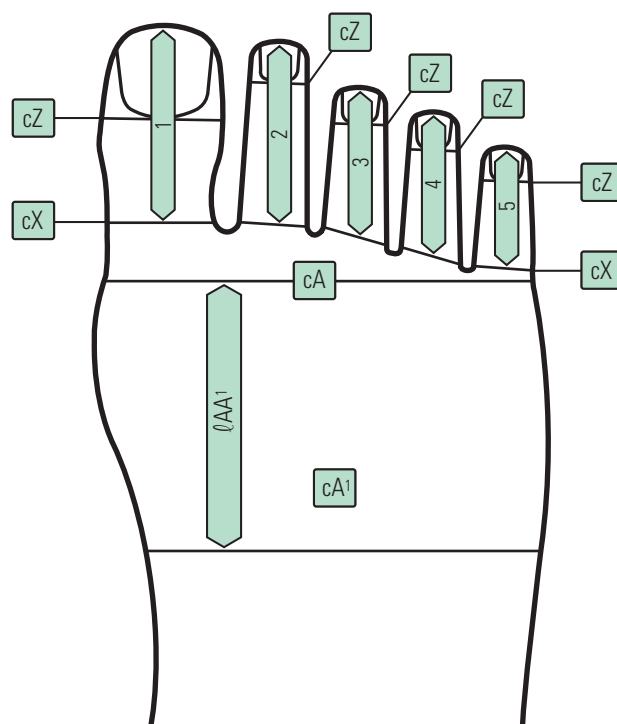

Omfångsmått i cm



Längdmått i cm