

Huomioitavaa:

- Potilaan käden turvotus tulee olla mahdollisimman vähäinen.
- Käytä apuna venymätöntä mittanauhaa, sormimittanauhaa ja viivainta, sekä ihoystävällistä merkintäkynää.
- Merkitse mittauspisteet kynällä potilaan kämmeneen.
- Ole erityisen tarkka, pieniä ympärysmittoja, eli sormien mittoja ottaessasi, sillä täsmällinen mittaustulos takaa hyvän istuvuuden. Merkitse mitat lomakkeelle ehdottoman tarkasti.
- Kun käsivarsi on erittäin turvonnut, suosittelemme valitsemaan viistoreunaisen hanskan pidennetyllä käsivarrella (A-E).

Pituusmitat (merkitse vastaavaan kohtaan lomakkeella):

- AB** = Kämmenpohjan mitta sormien (3 ja 4) juuresta meta carpuukseen.
- AC** = Koko kämmenpohjan mitta sormien juuresta ranteeseen.
- CC'** = Ranneosa 6 cm aikuisilla, lapsilla suhteessa lyhyempi.
- CD** = Mikäli hanskaan halutaan pidempi kalvosin.
- CE** = Tarvittaessa, täyspitkä käsivarsi n. 2 cm kyynärtaipeen alapuolelle, esim. kyynärvarren voimakkaan turvotuksen yhteydessä.
- Suosittelemme että sormiosa ei päättyisi suoraan nivelen kohdalle.
- Suosittelemme että sormet kudottaisiin väh. 2 cm:n pituisiksi, jotta ne eivät paina ja hierrä sormien väliä.
- Määrittele sormen pituus pisteestä "cX" sormenpäähän tai toivottuun pisteeseen, sormiviivaimen avulla, merkitse mitta lomakkeen pisteiviivalle.
- **Sormen nro 4 mitta otetaan viivaimen avulla 3. ja 4. sormen välistä.**


Ympärysmitat:

- cA** = kokonaisympärysmitta sormien 2-5 alta, poikkisuoraan kämmenen ympäri pikkusormen liitoskohdan korkeudelta.
- cB** = ympärysmitta metacarpuksen ympäri, peukalon kiinnityskulman korkeudella.
- cC** = ranteen ympärysmitta carpuksen korkeudella.
- cC'** = kyynärvarren ympärysmitta ranteesta 6 cm:n etäisyydellä.
- cD** = pidennetyn kalvosimen mitta, tarvittaessa.
- cE** = arviolta n. 2 cm kyynärtaipeen alapuolelta.
- cX** = yksilöllinen sormen ympärysmitta, mitattuna sormen juuresta.
- cZ** = ympärysmitta toivotusta pituusmitta pisteestä; umpikärkisen ympärysmitta kynnen juuresta.

 = Ympärysmitat cm:nä

 = Pituusmitat cm:nä

Huom!
CX-peukalon
ympärysmitta mitataan
heti peukalon
juurivivon yläpuolelta.

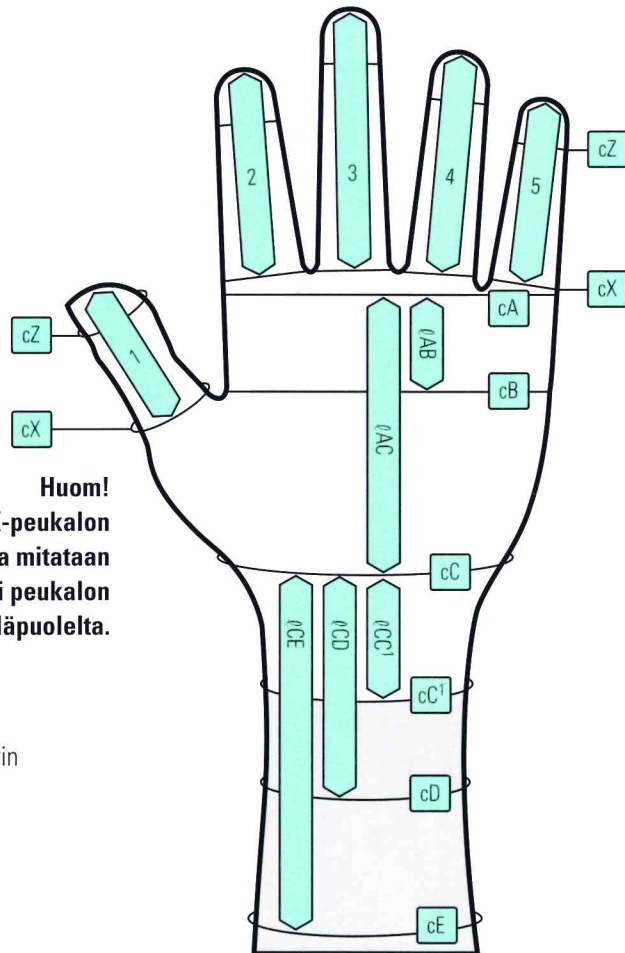

Mikäli kämmen turpooa siitä huolimatta, että käytössä on jo hyvin istuva hoitohanska, suosittelemme lisäksi paineittynyttä.

Lisää informaatiota erillisessä esitteessä