

Anvisning för exakt måttagning för Juzu® stumpkompressionsstrumpor

Vänligen observera:

För att säkerställa korrekt kompression ska omfångsmåttet mätas 5 cm proximalt från stumpände. Markera på rätt plats i utprovningsprotokollet. Mät sedan **samtliga** övriga mått, för det utförande som ska beställas, och skriv in ävenså i protokollet.

Kontrollera så att samtliga mått är angivna då utförande med höftdel eller livdel önskas.


Längdmåtten ska anges från stumpände. Mät i en rak linje, (följ INTE stumpens kontur) och ange i protokollet.

Vid beställning av stumpstrumpa i kombination med strumpbyxa, följande varianter är möjliga:

- En strumpa för det amputerade benet och det andra enligt storlek för normal kompressionsstrumpbyxa. (med/utan tådel). Ange storlek för strumpbyxa på gällande utprovningsprotokoll och bifoga detta vid beställning.
- Båda benen för stumpkompression. Ange samtliga mått till "T".
- Ett ben med stumpkompression, det andra med förlängd ben/lårdel. Ange omfångsmåtten för "F" och "G".

Kompressionstumpstrumpa med livdel (KT Juzu® Expert livdel – Höjd 23 cm)

Storlekar	1	2	3	4	5
Passande för midjeomfång	90	100	110	120	135

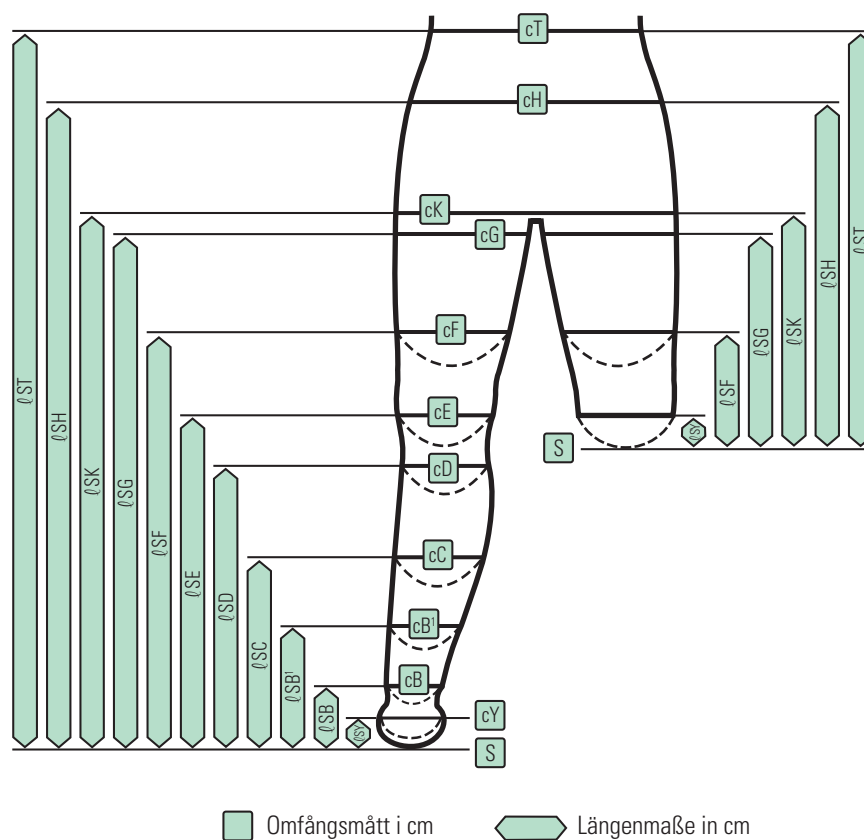

För ytterligare information om möjligheten att optimera behandlingen rekommenderar vi broschyren Juzu® Expert specialutförande.